

Používanie nebulizéra: (pre typy koncentrátorov s nebulizéry)

Nalejte tekutý liek do hrnčeka rozprašovača pred začatím liečby. (Obrázok 5)

Pripojte trubičku do výstupného konektora rozprašovača (tento konektor je vybavený skrutkovateľným uzáverom). Tekutý liek v hrnčeku rozprašovača sa začne rozprašovať, aj keď tento proces nie je veľmi viditeľný voľným okom.



Obrázok 5

Ak je liečivo v nebulizačnom hrnčeku vypotrebované, zaskrutkuje výstup nebulizácie, prístroj tak automaticky prejde do štandardného módu inhalácie kyslíka.

Upozornenie: "nebulizačný mód" prístroja musí byť používaný len s pripojeným "nebulizačným" hrnčekom. Výstupný tlak je vyšší, ak je prístroj zapnutý v "nebulizačnom móde". Prosím neinhaliujte kyslík v tomto móde bez nebulizačného hrnčeka!